

EN 14683 ist ein Produktstandard, den medizinische Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz) in Europa erfüllen müssen. Zu den Testanforderungen gehören die bakterielle Filtrationseffizienz, der Atemwiderstand, die Spritzfestigkeit und die mikrobiologische Reinheit. Typ IIR bietet den besten Schutz, da er auch vor Flüssigkeitsspritzern schützt.

So wird der Mund-Nasen-Schutz von MASCOT verwendet



1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich.



2. Halten Sie die Maske an den Ohrschnüren und platzieren Sie die Maske mit der Nasenklemme nach oben auf Ihrem Gesicht, sodass die Falten der Außenseite nach unten zeigen.



3. Ziehen Sie die Ohrschnüren hinter Ihre Ohren.



4. Passen Sie die Nasenklemme an Ihre Nase an und stellen Sie sicher, dass die Maske Kinn und Wangen fest verdeckt.



5. Nehmen Sie die Maske nur an den Ohrschnüren ab und entsorgen Sie die Maske direkt nach dem Gebrauch.

Verwendungszweck: Verhinderung der Ausbreitung von infektiösem Atem, Husten und Niesen. Schutz gegen das Einatmen von Partikeln aus der Luft wie Staub, Pollen, und übertragbaren Bakterien und Viren.

Warnung: Überprüfen Sie vor Gebrauch, dass die Verpackung versiegelt ist. Kinder dürfen die Maske nur mithilfe eines Erwachsenen benutzen.

Mehr Informationen über das Produkt finden Sie hier:

www.mascotworkwear.ch/de/mascot-complete-20950-921#71