

Anwendung und Pflege der Masken

Wir empfehlen die Maske nach dem Gebrauch einmal pro Tag bei 60°C zu waschen und dabei vorgängig die Filter zu entfernen.

Der Filter sollte unabhängig vom Waschen täglich gewechselt werden.

Generell empfehlen wir sich für den Gebrauch an die Empfehlungen des BAG zu halten.

Tragen der Schutzmaske auf eigene Verantwortung.

Hinweis für die erste Benutzung: Unsere Kraftwerk Masken sind bei der Lieferung gewaschen, dennoch empfehlen wir die Maske vor dem ersten Gebrauch einmal zu waschen.

Kraftwerk Maske Anziehen

1. Hände gründlich mit Seife waschen.
2. Filter in die Maske einlegen.
3. Nehmen Sie die Kraftwerk Maske an den elastischen Bändern und ziehen sie sie über das jeweilige Ohr.
4. Um die anderen zu schützen, ist es wichtig, dass Mund und Nase bedeckt sind, damit Sie beim Husten, Niesen oder Sprechen niemanden anstecken.
5. Je besser die Maske and der Aussenseite an Ihrem Gesicht anliegt, desto besser sind Sie geschützt.
6. Halten Sie trotzdem 2 Meter Abstand zu anderen Personen und befolgen Sie die empfohlenen Hygienemassnahmen weiterhin.

Kraftwerk Maske Abnehmen

1. Hände gründlich mit Seife waschen.
2. Nehmen Sie die Maske vorsichtig ab ohne ihr Gesicht zu berühren. Die Kraftwerk Maske sofort in einen eigenen Wäschebeutel oder in einen Plastiksack versorgen. Die Maske könnte mit Viren in Berührung gekommen sein, vermeiden sie den Kontakt der abgelegten Masken mit anderen Gegenständen. Hände gründlich mit Seife waschen.
3. Filter aus der Maske entfernen und entsorgen.
4. Die Kraftwerk Maske nach dem Gebrauch bei 60°C waschen (Waschmaschine).
5. Bleiben Sie gesund!

Hervorragender Schutz dank patentierter ETH Membrantechnologie - Swiss Made Filtermembran mit Porengrösse 1 Mikrometer (3x kleiner als herkömmliche Masken) Anwendung: Die Maske ist für die private sowie für die gewerblich-industrielle Anwendung vorgesehen, bei denen nicht explizit die Verwendung einer spezifischen Schutzmaske erfordert wird (keine medizinische Verwendung). - Die Austauschfilter sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen - Ist der Austauschfilter durch die Atemluft durchfeuchtet, sollte dieser gewechselt werden - Die Maske besteht aus Baumwolle und kann gewaschen werden (60°).